



# CRYOLIPOLYSE

TRAITEMENT PAR LE FROID - DERNIÈRE GÉNÉRATION



**SOIN MINCEUR ET SCULPTANT PAR CRYOTHÉRAPIE  
FAVORISANT L'ÉLIMINATION DES CELLULES GRAISSEUSES**

- Efficace
- Non invasif
- Sécurisé
- Sans douleur

BLC SYSTEM - DISTRIBUTEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL


# LA CRYOTHÉRAPIE CIBLÉE

## Soin minceur par le froid

La cryolipolyse est un processus d'élimination naturelle par l'organisme des lipides contenus dans les adipocytes (cellules grasses), qui n'altère pas le taux sanguin des lipides (cholestérol, triglycérides,...).

Durant les semaines qui suivent la séance de cryolipolyse, les adipocytes traités vont s'évacuer progressivement grâce à la phagocytose via le système lymphatique.

Les cellules grasses ainsi exposées à un froid intense et prolongé cristallisent et entrent dans un processus de mort naturelle programmée : l'apoptose.

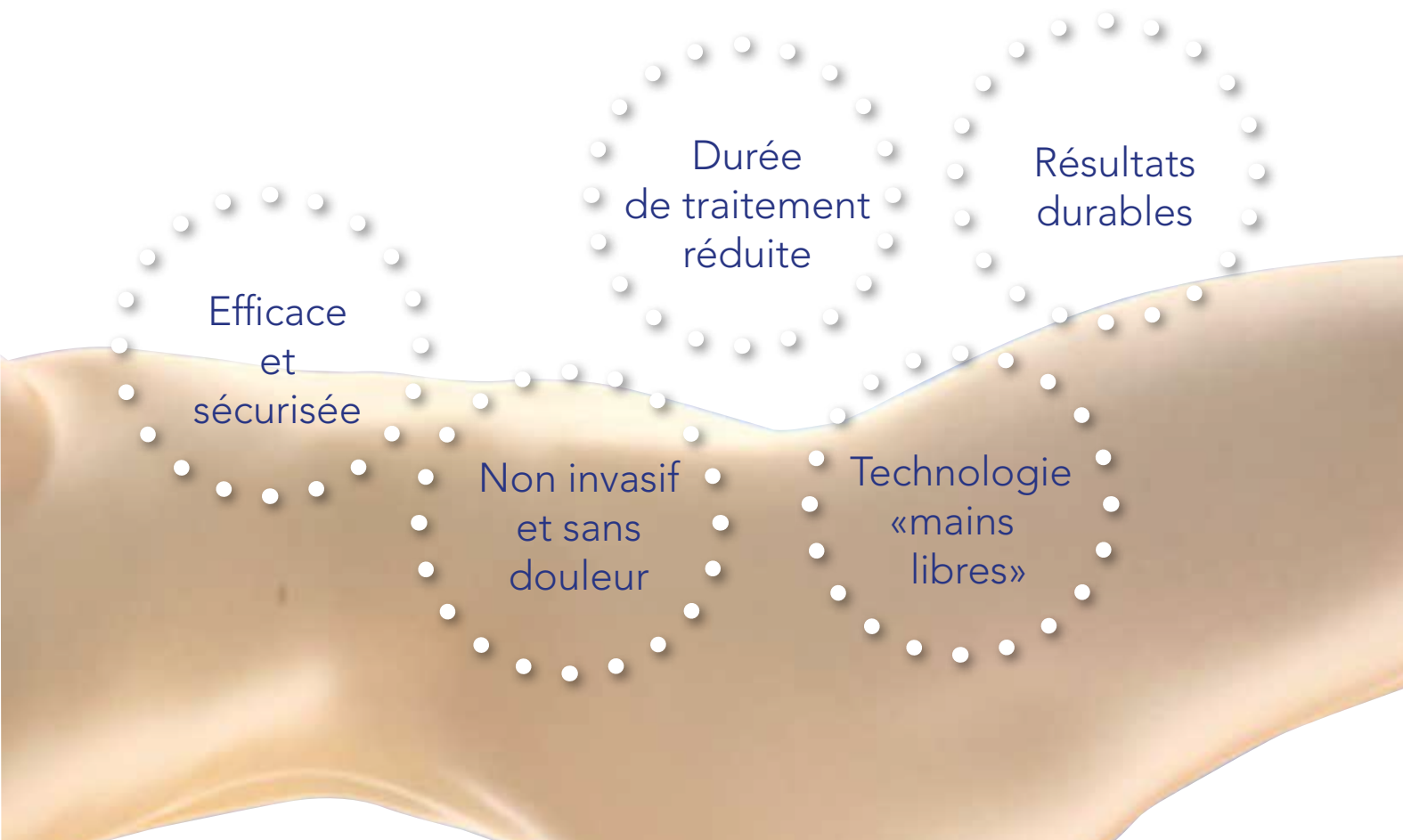

## Soin minceur par froid et aspiration


Températures de traitement appropriées :  
-5°C à -10°C.

Diffusion de manière uniforme sur toute la zone pendant la durée du traitement.

Ajustement de l'intensité depuis l'écran de contrôle.

Réduction des cellules grasses de 20 à 40 % après chaque séance.

Un matériel conçu pour une utilisation en continu.

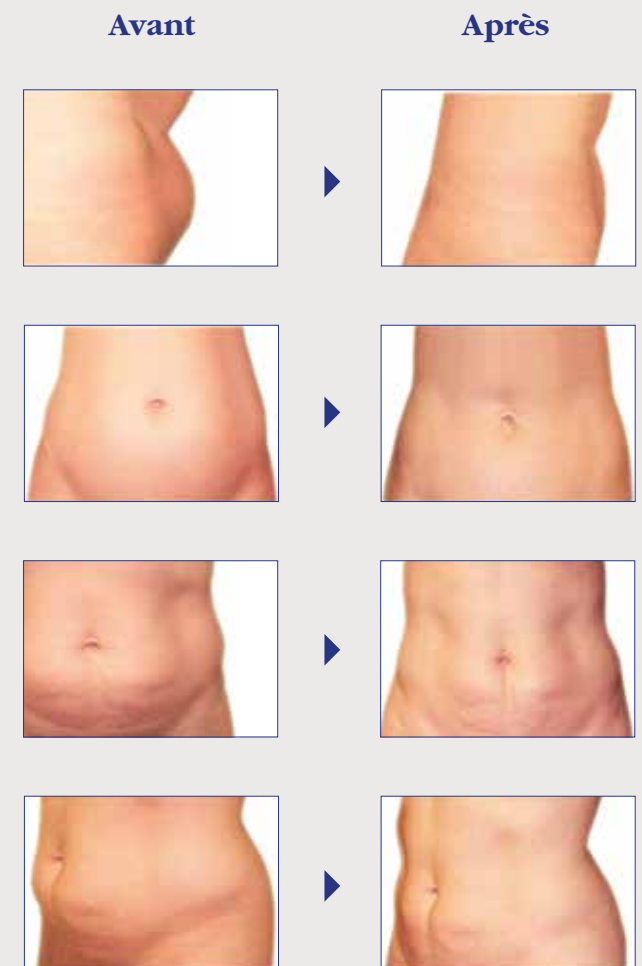


# Des applicateurs conçus pour agir sur la totalité de la zone traitée

À ce jour, la plupart des appareils de cryothérapie ciblée sont équipés d'applicateurs à zones partielles se limitant à deux panneaux refroidissants.

L'ergonomie de nos applicateurs, conçus entièrement en aluminium, permet une conduction de température sur 100% de la zone couverte.

Une différence permettant le maintien d'une température stable et l'atteinte rapide des conditions nécessaires au processus d'élimination des cellules graisseuses.

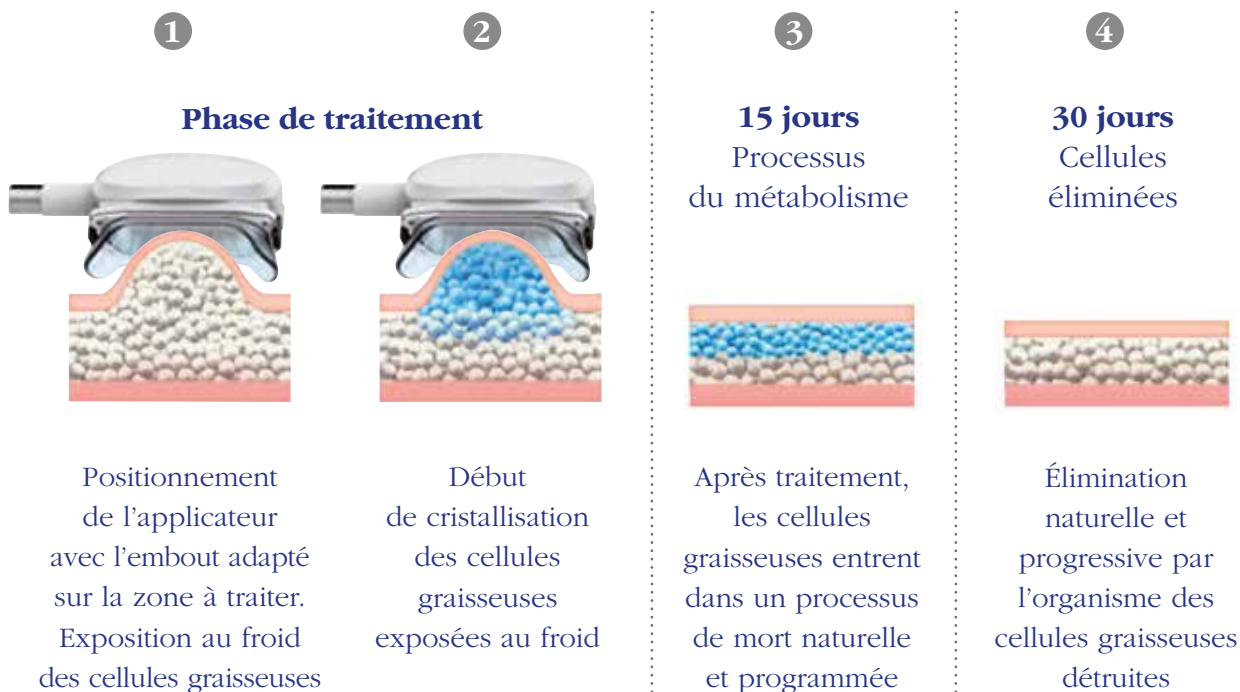

## Des applicateurs avec embouts modulables pour garantir confort et efficacité

Les embouts modulables permettent une adaptation à la morphologie de chaque zone à traiter, même les plus difficiles à atteindre.

D'un grand confort pour le patient, leur remplacement se fait rapidement grâce à des clips sécurisés.

**Embout 201**



201 x 72 x 76 mm  
Embout particulièrement adapté aux contours de l'abdomen.



**Embout 205**



205 x 79 x 74 mm  
Embout pour les flancs. Positionnement optimal sur les formes incurvées



**Embout 180**



180 x 69 x 46 mm  
Convient aux amas graisseux répartis sur la longueur comme l'abdomen ou les flancs.



### **Une cryode**

pour traiter les zones restreintes telles que le menton, ou les parties internes des bras...



Un système  
intégral  
refroidissant  
précis et  
performant

Réglage à 0.1°C

Une polyvalence  
et des résultats  
optimaux

Jusqu'à 4 zones traitées  
en une seule séance  
de façon simultanée






## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Certifications	CE, ROHS, IEC
• Méthode d'utilisation	Indépendant ou simultané
• Matériaux des applicateurs	Aluminium à haute conduction
• Épaisseur minimum de l'amas graisseux	10 mm
• Zones de traitement	1 à 4 zone(s) en une séance (4 max.)
• Zones de traitements recommandées	Abdomen, hanches, intérieur/extérieur des cuisses, genoux, bas des fesses
• Intensité d'aspiration	À définir en fonction de la zone et de l'épaisseur. - 5 niveaux d'aspiration
• Temps de traitement	30 à 60 minutes par zone et par séance
• Température par traitement	-5°C à -10°C en fonction de la zone
• Nombre total de traitements	1 à 3 session(s) par zone traitée
• Temps entre deux sessions sur une même zone	4 semaines
• Électricité	100/110 V, 220/240 V - 50/60 Hz
• Panneau de contrôle	Écran tactile LCD 8 pouces
• Dimensions (LxPxH mm)	1400 x 760 x 560
• Poids	63 kg



615 Route de Coudoux  
13410 Lambesc - France  
Siret 82958864900014

**Contact : Bastien Le Calvez**

 +33 6 80 38 44 68  
 lecalvezbastien@gmail.com  
 www.blc-system.com



Bastien LC



BLC SYSTEM  
Bastien Le Calvez